

Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 21.02 АЛЬБУМИН-02-ВИТАЛ

Метод определения – колориметрический, бромкрезоловый зеленый

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ()	Номер по списку	15 ENTER
IDENTIFICATION: ()	Название методики	(1) ALBU
MODE: ()	Выбор режима	(1)E.P.
WL1:()	Выбор фильтра 1	(6) 630 nm
UNITS: ()	Набрать код единиц измерения	(4) g/l
TEMPERATURE: ()	Температура	(2) комнатная
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
STD:.()	Концентрация стандарта	60.0
LIN. LIMIT: ()	Предел линейности	60.0
NORM. HIGH: ()	Верхний предел нормы	50.0
NORM. LOW: ()	Нижний предел нормы	35.0
DECIMALS: ()	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ()	Объем образца (мкл.)	4
REAG V.: ()	Объем реагента (мкл.)	650
REAC. TIME: ()	Время реакции (сек.)	180



ООО «Медицинские
Инновационные Технологии»
454000, г.Челябинск, ул.40-
летия Победы д.30 офис 5
e-mail: mdnt@mdnt.ru
www.mdnt.ru



АО «Витал Диагностикс СПб»
194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24,
326-61-98
e-mail: sale@vitaldiagnostics.ru
<http://www.VitalDiagnostics.ru>