

## Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кар. № В 46.01 АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН (О)-01-ВИТАЛ

Кар. № В 46.11 АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН (О)-11-ВИТАЛ

### Метод определения – иммунотурбидиметрический

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ( )	Номер по списку	30 ENTER
IDENTIFICATION: ( )	Название методики	(7)ASO
MODE: ( )	Выбор режима	(6) MSTD
MSTD MODE	Выбор мультистандартного режима	(4) DIF
WL1:( )	Выбор фильтра 1	(6) 630 nm
UNITS: ( )	Набрать код единиц измерения	(3)U/ml
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
Nr of STANDARDS	Число стандартов	(6)
STD: (1)	Концентрация стандарта 1	0.0
STD: (2 )	Концентрация стандарта 2	1/16*С
STD: (3)	Концентрация стандарта 3	1/8*С
STD: (4)	Концентрация стандарта 4	1/4*С
STD: (5)	Концентрация стандарта 5	1/2*С
STD: (6)	Концентрация стандарта 6	*С
READINGS PER STANDARD	Число замеров стандарта	1
READINGS PER SAMPLE	Число замеров образца	1
TEMPERATURE: ( )	Температура	(1)37°C
LIN. LIMIT.: ( )	Предел линейности	350
NORM. HIGH: ( )	Верхний предел нормы	200
NORM. LOW: ( )	Нижний предел нормы	0
DECIMALS: ( )	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ( )	Объем образца (мкл)	7
REAG V.: ( )	Объем реагента (мкл)	595
REAC. TIME	Время реакции (сек.)	300



ООО «Медицинские  
Инновационные Технологии»  
454000, г.Челябинск, ул.40-  
летия Победы д.30 офис 5  
e-mail: [mdnt@mdnt.ru](mailto:mdnt@mdnt.ru)  
[www.mdnt.ru](http://www.mdnt.ru)



АО «Витал Диагностикс СПб»  
194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33  
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24,  
326-61-98  
e-mail: [sale@vitaldiagnostics.ru](mailto:sale@vitaldiagnostics.ru)  
<http://www.VitalDiagnostics.ru>