

## Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 18.02 КАЛЬЦИЙ-02-ВИТАЛ

Метод определения – колориметрический.

### 1. Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Это значит                   | Нажать кнопки    |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| CODE: ( )           | Номер по списку              | * ENTER          |
| IDENTIFICATION: ( ) | Название методики            | (13) Calcium     |
| MODE: ( )           | Выбор режима                 | (1)E.P.          |
| WL1:( )             | Выбор фильтра 1              | (6) 578 nm       |
| WL2: ( )            | Выбор фильтра 2              | (8) -            |
| UNITS: ( )          | Набрать код единиц измерения | (11) mmol/l      |
| TEMPERATURE: ( )    | Температура                  | (1)37°C          |
| STANDARD (Y/N)      | Стандарт (есть/нет)          | (Y) Используется |
| STD: ( )            | Концентрация стандарта       | 2.27             |
| LIN. LIMIT.: ( )    | Предел линейности            | 6.5              |
| NORM. HIGH: ( )     | Верхний предел нормы         | 2.60             |
| NORM. LOW: ( )      | Нижний предел нормы          | 2.02             |
| DECIMALS: ( )       | Число знаков после запятой   | 2                |
| SAMPLE V.:( )       | Объем образца (мкл.)         | 5                |
| REAG V.: ( )        | Объем реагента (мкл.)        | 500              |
| REAC. TIME: ( )     | Время реакции (сек.)         | 300              |

\* Выбрать номер канала. прибора, куда будет запрограммирована методика.



ООО «Медицинские  
Инновационные Технологии»  
454000, г.Челябинск, ул.40-летия  
Победы д.30 офис 5  
е-mail: [mdnt@mdnt.ru](mailto:mdnt@mdnt.ru)  
[www.mdnt.ru](http://www.mdnt.ru)



АО «Витал Диагностикс СПб»  
194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33  
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98  
е-mail: [sale@vitaldiagnostics.ru](mailto:sale@vitaldiagnostics.ru)  
<http://www.VitalDiagnostics.ru>