

Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 41.12 МИКРОАЛЬБУМИН-12-ВИТАЛ
Кат. № В 41.22 МИКРОАЛЬБУМИН-22-ВИТАЛ

Метод определения –иммунотурбидиметрический

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ()	Номер по списку	39 ENTER
IDENTIFICATION: ()	Название методики	(51)MALB
MODE: ()	Выбор режима	(6) MSTD
MSTD MODE	Выбор мультистандартного режима	(4) DIF
WL1:()	Выбор фильтра 1	(1) 340 nm
WL2:()	Выбор фильтра 2	(7) 670 nm
UNITS: ()	Набрать код единиц измерения	(6) mg/l
TEMPERATURE: ()	Температура	(2) комнатная
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
Nr of STANDARDS	Число стандартов	(6)
STD: (1)	Концентрация стандарта 1	0.0
STD: (2)	Концентрация стандарта 2	1/16*С
STD: (3)	Концентрация стандарта 3	1/8*С
STD: (4)	Концентрация стандарта 4	1/4*С
STD: (5)	Концентрация стандарта 5	1/2*С
STD: (6)	Концентрация стандарта 6	*С
READINGS PER STANDARD	Число замеров стандарта	1
READINGS PER SAMPLE	Число замеров образца	1
TEMPERATURE: ()	Температура	(1)37°С
LIN. LIMIT.: ()	Предел линейности	410
NORM. HIGH: ()	Верхний предел нормы	25
NORM. LOW: ()	Нижний предел нормы	0
DECIMALS: ()	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ()	Объем образца (мкл)	30
REAG V.: ()	Объем реагента (мкл)	525
DELAY	Задержка	30
INTERVAL	Интервал	0
REAC. TIME	Время реакции (сек.)	0

Примечания:

*С – Концентрация калибратора (стандарта 7), указана в паспорте. Остальные стандарты должны быть приготовлены из него путем последовательных двукратных разведений физ.раствором.

В качестве стандарта 1 с нулевой концентрацией используется физ.раствор.



ООО «Медицинские
Инновационные Технологии»
454000, г.Челябинск, ул.40-летия
Победы д.30 офис 5
e-mail: mdnt@mdnt.ru
www.mdnt.ru



АО «Витал Диагностика Спб»
194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98
e-mail: sale@vitaldiagnostics.ru
<http://www.VitalDiagnostics.ru>