

## **Параметры программирования прибора CLIMA MC –15**

Кат. № В 17.02 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-02-ВИТАЛ, Кат. № В 17.01 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-01-ВИТАЛ  
Кат. № В 17.12 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-12-ВИТАЛ, Кат. № В 17.11 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-11-ВИТАЛ  
Кат. № В 17.22 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-22-ВИТАЛ Кат. № В 17.21 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-21-ВИТАЛ

### **Метод определения – энзиматический колориметрический**

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ( )	Номер по списку	4 ENTER
IDENTIFICATION: ( )	Название методики	(58) Triglycerides
MODE: ( )	Выбор режима	(1)E.P.
WL1:( )	Выбор фильтра 1	(3) 500 nm
WL2: ( )	Выбор фильтра 2	
UNITS: ( )	Набрать код единиц измерения	(11) mmol/L
TEMPERATURE: ( )	Температура	(1)37°C
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
STD:( )	Концентрация стандарта	2,85 mmol/L
LIN. LIMIT: ( )	Предел линейности	8 mmol/L
NORM. HIGH: ( )	Верхний предел нормы	1,82 mmol/L
NORM. LOW: ( )	Нижний предел нормы	0,15 mmol/L
DECIMALS: ( )	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ( )	Объем образца (мкл.)	5
REAG V.: ( )	Объем реагента (мкл.)	500
REAC. TIME: ( )	Время реакции (сек.)	300



ООО «Медицинские  
Инновационные Технологии»  
454000, г.Челябинск, ул.40-летия  
Победы д.30 офис 5  
е-mail: [mdnt@mdnt.ru](mailto:mdnt@mdnt.ru)  
[www.mdnt.ru](http://www.mdnt.ru)



АО «Витал Диагностика СПб»  
194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33  
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98  
е-mail: [sale@vitaldiagnostics.ru](mailto:sale@vitaldiagnostics.ru)  
<http://www.VitalDiagnostics.ru>