

Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 22.01 ЦИНК-01-ВИТАЛ

Метод определения - КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ()	Номер по списку	* ENTER
IDENTIFICATION: ()	Название методики	(61) ЦИНК
MODE: ()	Выбор режима	(1)E.P.
WL1:()	Выбор фильтра 1	(4) 546 nm
WL2: ()	Выбор фильтра 2	(7) 670 nm
UNITS: ()	Набрать код единиц измерения	(12)mkmol/l
TEMPERATURE: ()	Температура	(1)37°C
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
STD: ()	Концентрация стандарта	30.6
LIN. LIMIT: ()	Предел линейности	61.2
NORM. HIGH: ()	Верхний предел нормы	23
NORM. LOW: ()	Нижний предел нормы	7
DECIMALS: ()	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ()	Объем образца (мкл.)	20
REAG V.: ()	Объем реагента (мкл.)	400
REAC. TIME: ()	Время реакции (сек.)	300



ООО «Медицинские
Инновационные Технологии»
454000, г.Челябинск, ул.40-летия
Победы д.30 офис 5
e-mail: mdnt@mdnt.ru
www.mdnt.ru



АО «Витал Диагностика СПб»
194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98
e-mail: sale@vitaldiagnostics.ru
<http://www.VitalDiagnostics.ru>