

## Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 24.01 ЖЕЛЕЗО-01-ВИТАЛ

Кат. № В 24.11 ЖЕЛЕЗО-11-ВИТАЛ

Кат. № В 24.31 ЖЕЛЕЗО-31-ВИТАЛ

Метод определения – колориметрический, Nitro-PAPS, без депротеинизации, биреактив

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ( )	Номер по списку	16 ENTER
IDENTIFICATION: ( )	Название методики	(40) Iron
MODE: ( )	Выбор режима	(1)E.P.
WL1:( )	Выбор фильтра 1	(5) 578 nm
WL2:( )	Выбор фильтра 2	0
UNITS: ( )	Набрать код единиц измерения	(12) mkmol/l
TEMPERATURE: ( )	Температура	(1)37°C
STANDARD (Y/N)	Стандарт (есть/нет)	(Y) Используется
STD: ( )	Концентрация стандарта	30.0
LIN. LIMIT.: ( )	Предел линейности	179
NORM. HIGH: ( )	Верхний предел нормы	30.0
NORM. LOW: ( )	Нижний предел нормы	8.8
DECIMALS: ( )	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ( )	Объем образца (мкл.)	25
REAG V.: ( )	Объем реагента (мкл.)	500
REAC. TIME: ( )	Время реакции (сек.)	600



ООО «Медицинские  
Инновационные Технологии»  
454000, г.Челябинск, ул.40-летия  
Победы д.30 офис 5  
е-mail: [mdnt@mdnt.ru](mailto:mdnt@mdnt.ru)  
[www.mdnt.ru](http://www.mdnt.ru)



АО «Витал Диагностика СПб»  
194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33  
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24, 326-61-98  
е-mail: [sale@vitaldiagnostics.ru](mailto:sale@vitaldiagnostics.ru)  
<http://www.VitalDiagnostics.ru>