

Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 07.04 γ-ГТП-04-ВИТАЛ

Метод определения – кинетический

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ()	Номер по списку	10 ENTER
IDENTIFICATION: ()	Название методики	(27) GGT
MODE: ()	Выбор режима	(2) KIN
WL1:()	Выбор фильтра 1	(2) 405 nm
UNITS: ()	Набрать код единиц измерения	(1)U/L
TEMPERATURE: ()	Температура	(1)37°C
FACTOR: ()	Фактор	1158
N. OF READINGS: ()	Число замеров	5
INTERVAL: ()	Интервал	60
DELAY: ()	Задержка	90
ABS. LIM. MAX (Y/N)	Предел абсорбции (верхн / нижн.)	Y
ABS. LIM	Предел абсорбции	2.000
LIN. LIMIT.: ()	Предел линейности	230
NORM. HIGH: ()	Верхний предел нормы	50
NORM. LOW: ()	Нижний предел нормы	7
DECIMALS: ()	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ()	Объем образца (мкл.)	50
REAG V.: ()	Объем реагента (мкл.)	500

Примечания:

1. Если активность превышает 230 Е/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на фактор разведения.



ООО «Медицинские
Инновационные Технологии»
454000, г. Челябинск, ул. 40-
летия Победы д. 30 офис 5
e-mail: mdnt@mdnt.ru
www.mdnt.ru



АО «Витал Диагностикс СПб»
194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24,
326-61-98
e-mail: sale@vitaldiagnostics.ru
<http://www.VitalDiagnostics.ru>