

## Параметры программирования прибора CLIMA MC –15

Кат. № В 11.02 а-АМИЛАЗА-02-ВИТАЛ

Кат. № В 11.12 а-АМИЛАЗА-12-ВИТАЛ

Кат. № В 11.22 а-АМИЛАЗА-22-ВИТАЛ

**Метод определения – колориметрический энзиматический кинетический, EPS-метод**

Сообщение фотометра	Это значит	Нажать кнопки
CODE: ( )	Номер по списку	24 ENTER
IDENTIFICATION: ( )	Название методики	(2) Amylase
MODE: ( )	Выбор режима	(2) KIN
WL1:( )	Выбор фильтра 1	(2) 405 nm
UNITS: ( )	Набрать код единиц измерения	(1)U/L
TEMPERATURE: ( )	Температура	(1)37°C
FACTOR: ( )	Фактор	2476
N. OF READINGS: ( )	Число замеров	3
INTERVAL: ( )	Интервал	60
DELAY: ( )	Задержка	120
ABS. LIM. MAX (Y/N)	Предел абсорбции (верхн / нижн.)	Y
ABS. LIM	Предел абсорбции	1.0
LIN. LIMIT.: ( )	Предел линейности	1320
NORM. HIGH: ( )	Верхний предел нормы	110
NORM. LOW: ( )	Нижний предел нормы	1
DECIMALS: ( )	Число знаков после запятой	2
SAMPLE V.: ( )	Объем образца (мкл.)	20
REAG V.: ( )	Объем реагента (мкл.)	500



ООО «Медицинские  
Инновационные Технологии»  
454000, г.Челябинск, ул.40-  
летия Победы д.30 офис 5  
e-mail: [mdnt@mdnt.ru](mailto:mdnt@mdnt.ru)  
[www.mdnt.ru](http://www.mdnt.ru)



АО «Витал Диагностикс СПб»  
194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 27, а/я 33  
т/ф (812) 293-21-32, 293-23-24,  
326-61-98  
e-mail: [sale@vitaldiagnostics.ru](mailto:sale@vitaldiagnostics.ru)  
<http://www.VitalDiagnostics.ru>